

HAI UNA MACCHINA PER CUCIRE ?



SEI ISOLATA\* A CASA MA VUOI DARE  
UNA MANO A CHI DEVE USCIRE ?



LE TUE MASCHERINE DI STOFFA IGIENIZZABILI  
E RIUTILIZZABILI POSSONO SERVIRE A CHI LAVORA  
CON ALTRE PERSONE, A CHI DEVE FARE LA SPESA...

*Autorganizzati & Condividi Talento! \**


## MATERIALI

Cosa ci occorre:

forbici e matita  
macchina da cucire  
stoffa di cotone 100%  
filo elastico o simili  
Fogli di PVC morbido  
o Carta da forno  
Filo di Ferro  
ago e spilli




TAGLIA

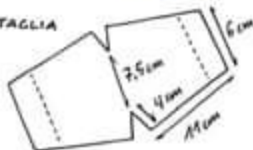

Ritagliare un cartamodello di cartone con queste misure segnando due alette ai lati da poter piegare.

TAGLIA

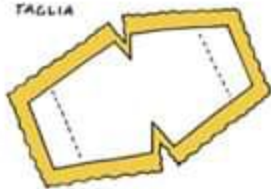

Poggiare il cartamodello sulla stoffa (al rovescio), segnare a matita il contorno e ritagliare lasciando il margine di 1cm circa - serviranno due pezzi di stoffa così (A e B).


TAGLIA




Poggiare il cartamodello su altra stoffa (al rovescio) stavolta piegandone prima le alette. Segnare a matita e ritagliare con margine anche qui. Avremo il pezzo C.




Avremo così 3 pezzi di stoffa (A, B e C) per ogni mascherina che vogliamo realizzare. Su ognuna (al rovescio) avrò segnati i contorni a matita.

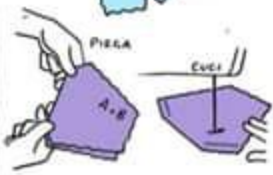


I due pezzi grandi (A e B) vanno piegati lungo la linea centrale (lato rovescio) e va vanno cucite le piccole diagonali.

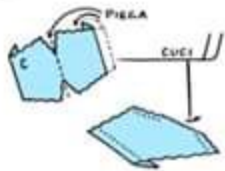

Del pezzo C vanno cucite le stesse diagonali (lato rovescio) e anche un orlo di 0,50cm su ogni lato corto.

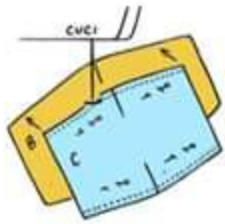

Poggiare C sopra B (diritto su dritto) facendo combaciare le diagonali che avete appena cucito. Fissare con gli spilli e cucire lungo tutto il lato superiore e lungo quello inferiore. CB sarà ora un solo pezzo.

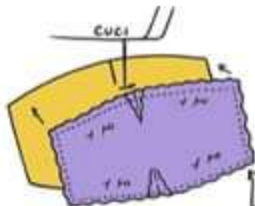



Posizionare A su BC (dritto contro dritto) facendo combaciare le diagonali. Fissare con spilli tutto il bordo e cucire lungo tutti i lati **TRANNE UNO** di quelli corti!

Ci servirà per risvoltare tutta la maschera.




Risvoltare la stoffa e chiudere il lato aperto con uno spillo.

Cucire quindi tutti i bordi seguendo il contorno.

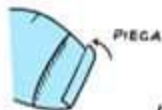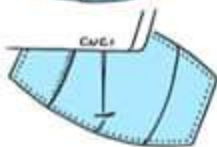

Ultime cuciture: piegare leggermente entrambi i lati corti della maschera e cucire in verticale per creare il canale che ospiterà l'elastico per le orecchie.



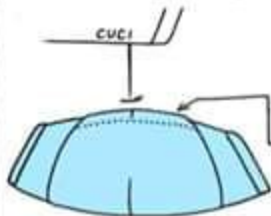

Lungo il lato superiore cucire un altro "bina-rio" che servirà per poter infilare il filo di ferro.



Tagliare il filtro in PVC o la Carta da Forno Bio degradabile di 15x7 cm. Se avete il PVC disinfet- tarlo prima di inserirlo.



Tagliare due pezzi di filo elastico di 24 cm e infilarli con un ago nei canali creati ai lati.

Tagliare un pezzo di filo di ferro di 14 cm e infilarlo con un ago nel canale creato sul lato superiore.

...CONDIVIDIAMO CIÒ CHE ABBIAMO ♡


# MODELLO Rigido

All'interno della maschera trovate un filtro morbido in PVC e un filo di ferro per stringere sul naso quanto occorre.

Disinfettate con alcol il filtro su entrambi i lati prima di usare la maschera



Tornate a casa sfilate filtro e filo di ferro riponendoli in una bustina e lavate la maschera sopra i 40° con disinfettanti o candeggina.

Se decidete di usare il filo di ferro ogni volta che portate la maschera, basterà infilarlo nel canale apposito con un ago (più semplice di quanto sembri!!!) ma ricordatevi di rimuoverlo prima di mettere la maschera in lavatrice 



Se si dovessero rompere gli elastici... **NO PANIC!**  
Sostituiteli con elastici da cucina.